

*virus***BLOC**

ORAL FRESH Spray Buccale

Protegge le mucose orali dai coronavirus

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

VirusBLOC Oral Fresh è un fluido da spruzzare nella cavità orale per formare un film protettivo delle mucose orali contro i virus dotati di involucro (capside) fosfolipidico (tra cui i coronavirus). Il dispositivo intrappola i coronavirus, li disattiva e impedisce loro di diffondersi e di replicarsi.

INDICAZIONI - CONTROINDICAZIONI

VirusBLOC Oral Fresh è indicato per essere utilizzato come coadiuvante protettivo delle mucose orali, quando esposti a rischio di contagio da virus dotati di involucro (capside) fosfolipidico (tra cui i coronavirus) o non appena si manifestano sintomi simili a quelli del mal di gola.


Se usato ai primi sintomi di infezione, quando la carica virale è bassa, VirusBLOC Oral Fresh riduce la possibilità che questa si sviluppi completamente.

VirusBLOC Oral Fresh è destinato ad essere utilizzato da pazienti adulti e da pazienti pediatrici a partire da 4 anni di età.

Non sono noti effetti collaterali correlati all'uso del prodotto. Il dispositivo medico non è indicato per i soggetti con nota ipersensibilità e/o allergia ai componenti presenti nella formulazione. Non usare il prodotto durante la gravidanza o l'allattamento in quanto non vi sono ancora informazioni cliniche disponibili.

COME FUNZIONA


La cavità orale rappresenta un potenziale sito di trasmissione e replicazione del virus SARS-CoV-2, nella fase iniziale della malattia COVID-19. Il SARS-CoV-2, appartenente alla famiglia dei Coronaviridae, è un "enveloped virus", caratterizzato cioè dalla presenza di un involucro esterno (pericapside) costituito da una membrana fosfolipidica a doppio strato (bilayer).

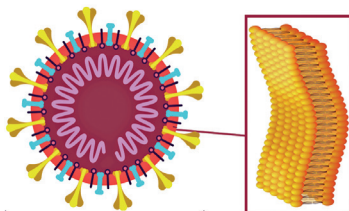

Membrana fosfolipidica a doppio strato

VirusBLOC Oral Fresh è costituito da 3 ingredienti principali: glicerolo, sorbitolo e Nicomenthyl® (mentil nicotinato), che, in sinergia tra di loro, creano una protezione efficace che svolge tre azioni di tipo chimico-fisico/meccanico:

- 1. INTRAPPOLARE:** il glicerolo e il sorbitolo creano una barriera muco-adesiva transitoria e osmoticamente attiva che intrappola i virus.
- 2. DISATTIVARE:** la particolare struttura lipidica/anfifilica (avente cioè carattere sia idrofobo che idrofilo) del Nicomenthyl® interferisce con i pericapsidi (anch'essi di natura lipidica e anfifilica) dei virus, perturbandone la conformazione e impedendo loro di penetrare e infettare le cellule.
- 3. PROTEGGERE:** la barriera di VirusBLOC Oral Fresh protegge la cavità orale e la gola, contribuendo a rafforzare l'azione naturale di umettazione, idratazione e difesa delle secrezioni mucose.

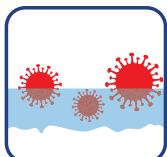

1. INTRAPPOLARE



2. DISATTIVA



3. PROTEGGE

AVVERTENZE

Prima dell'uso leggere attentamente le informazioni fornite dal fabbricante.

ViruBLOC Oral Fresh non sostituisce l'uso delle mascherine e di tutte le altre misure di protezione da infezioni da SaRS-CoV-2 raccomandate dalle autorità sanitarie.

In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare un medico.

Consultare il proprio medico se si ha febbre alta o se i sintomi sono più gravi di quelli di un comune mal di gola.

Non usare il prodotto a seguito di un intervento chirurgico alla bocca e/o alla gola finché la ferita non è guarita, senza consultare un medico. Per l'utilizzo congiunto con altri prodotti per uso orale si raccomanda di consultare un medico.

Non eccedere la dose consigliata. Il prodotto non deve essere utilizzato continuativamente per più di 30 giorni.

Non spruzzare il prodotto negli occhi o in distretti differenti dal cavo orale; nel caso di contatto accidentale con gli occhi lavare con abbondante acqua corrente.

Non utilizzare il prodotto se la confezione risulta aperta o danneggiata.

Non utilizzare dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e conservato in modo corretto.

L'applicazione sui bambini deve essere effettuata da un adulto.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Per una corretta pulizia si raccomanda di risciacquare con acqua corrente e asciugare il beccuccio erogatore prima di richiuderlo utilizzando l'apposito tappo.

Per ridurre il rischio di diffusione dei virus e contaminazione crociata, si raccomanda di non condividere il dispositivo con altri utilizzatori.

ISTRUZIONI PER L'USO

Al primo utilizzo premere 2-3 volte l'erogatore per riempire la pompa, permettendo un flusso continuo del prodotto.

Aprire la bocca e indirizzare l'erogatore verso la gola.

Premere la pompa e spruzzare 2 volte.

Aiutandosi con la lingua, distribuire il prodotto all'interno della cavità orale (interno delle guance, gengive, palato) e sulle labbra.

Risciacquare l'erogatore al termine dell'utilizzo posizionandolo sotto un getto di acqua corrente, asciugare e richiudere utilizzando l'apposito tappo.

Allo scopo di prolungare l'effetto protettivo, se possibile, si raccomanda di non mangiare e non bere per un periodo di 30 minuti dopo l'applicazione.

POSOLOGIA

2 spruzzate ogni 2 ore per un massimo di 6 volte al giorno per tutto il tempo in cui si è potenzialmente esposti al contagio. Il prodotto non deve essere utilizzato continuativamente per più di 30 giorni.

L'applicazione sui bambini deve essere effettuata da un adulto.

Per l'utilizzo del dispositivo non è necessario uno specifico addestramento o una particolare attenzione.

COME CONSERVARE ViruBLOC Oral Fresh

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, a temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

Conservare questo foglio fino all'esaurimento del prodotto, per la consultazione in caso di necessità.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO

I residui del dispositivo medico ViruBLOC Oral Fresh possono essere considerati come rifiuti domestici e smaltiti, unitamente al confezionamento primario, in accordo alla legislazione vigente. I componenti dei dispositivi non devono essere dispersi nell'ambiente.

Flacone GL 72	Vetro
Astuccio PAP 21	Carta
Foglietto PAP 22	
Etichetta PP5	
Cappuccio LDPE4	Plastica
Attuatore PP5	
Pompa C/LDPE 92	

ViruBLOC ORAL FRESH 20 ml e

Revisione 01 - 05/2021

Dispositivo Medico



REF 2003058R3



Multichem R&D srl - Via G. Marconi 37 - 20089 Rozzano (MI) - Italia
www.multichemrd.com

Nicomenthyl® (Mentil nicotinato) è un marchio registrato di Multichem R&D